

AUTOINJEKTOR-TRAININGSGERÄT: GEBRAUCHSANWEISUNG

Mit dem Autoinjektor-Trainingsgerät wird die Anwendung eines mit Arzneimittel vorbefüllten Autoinjektors simuliert.


Es ist ausschließlich **für Schulungszwecke vorgesehen**.

Es enthält weder Chemikalien noch eine Nadel und stellt keine Gesundheits- oder Sicherheitsgefahr dar.


Es kann zur Wiederverwendung neu geladen werden.

Im Lieferumfang des Autoinjektor-Trainingsgerätes ist eine transparente Hülse zum Neuladen enthalten.

Hauptbestandteile des Autoinjektor-Trainingsgerätes

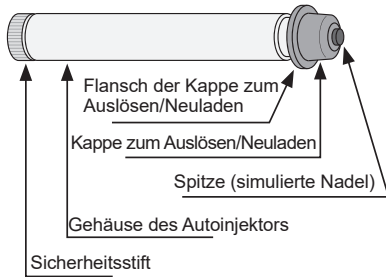

Transparente Hülse zum Neuladen

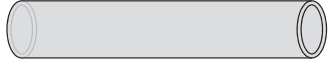

WICHTIGER HINWEIS

Die transparente Neuladehülse dient ausschließlich dem Zweck, das Autoinjektor-Trainingsgerät nach jedem Gebrauch erneut zu laden.

Die transparente Neuladehülse ist weder ein fester Bestandteil des Autoinjektor-Trainingsgerätes noch des eigentlichen Autoinjektors.

194061 061002-I

Verwendung des Autoinjektor-Trainingsgerätes:

1.



Nehmen Sie das Autoinjektor-Trainingsgerät aus dem Plastikbeutel.

Achten Sie darauf, die Finger nicht auf die Kappe zum Auslösen/Neuladen zu legen!

ANMERKUNG

Falls bei der Lieferung die Neuladehülse auf das Autoinjektor-Trainingsgerät aufgesetzt sein sollte, ziehen Sie das Trainingsgerät aus der transparenten Neuladehülse heraus.

2.



Halten Sie das Autoinjektor-Trainingsgerät so, dass die Kappe für das Auslösen/Neuladen nach unten zeigt.

3.



Entfernen Sie mit der anderen Hand den Sicherheitsstift.

4.

Zielen Sie und stoßen Sie die Auslöse-/Neuladekappe gerade nach unten (in einem 90°-Winkel) auf den mittleren äußeren Oberschenkel.



Sie können durch die Kleidung injizieren, sollten jedoch zuvor alle Gegenstände in und an der Kleidung des/der Patienten/Patientin entfernen, die bei der Injektion stören könnten.




Drücken Sie das Autoinjektor-Trainingsgerät mindestens 10 Sekunden lang auf die Körperstelle, um eine vollständige Injektion zu simulieren.

HINWEIS

Wenn eine Person an der Mitte des äußeren Oberschenkels wenig Fett hat, ziehen Sie an der Injektionsstelle eine Hautfalte hoch, um einen dickeren Bereich für die Verabreichung zu schaffen.

5. Entfernen Sie das Autoinjektor-Trainingsgerät vom mittleren äußeren Oberschenkel und massieren Sie die Injektionsstelle mehrere Sekunden lang mit kreisenden Bewegungen, in Anlehnung an die tatsächliche Anwendung.

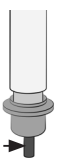

Prüfen Sie, ob die Spitze (simulierte Nadel) herausgedrückt wurde. Dies zeigt eine erfolgreiche Aktivierung des Autoinjektor-Trainingsgerätes an.

HINWEIS

Das eigentliche Arzneimittel enthält eine Nadel, die nach dem Gebrauch gebogen und in einem gut sichtbaren Bereich (z. B. am Oberarm) an der Kleidung der Person befestigt werden muss, der das Mittel verabreicht wurde.



WARNUNG


Den Sicherheitsstift nicht wieder einsetzen, solange das Gerät noch nicht neu geladen wurde und die Spitze (die simulierte Nadel) noch herausragt. Das Autoinjektor-Trainingsgerät könnte dadurch stark beschädigt werden.

Neuladen des Autoinjektor-Trainingsgerätes für die Wiederverwendung:




WARNUNG

Den Sicherheitsstift nicht wieder einsetzen, solange das Gerät noch nicht neu geladen wurde und der Stift (die simulierte Nadel) noch herausragt. Das Autoinjektor-Trainingsgerät könnte dadurch stark beschädigt werden.

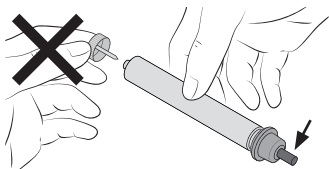

1.

Platzieren Sie das Autoinjektor-Trainingsgerät mit der Spitze (simulierte Nadel) senkrecht auf eine flache, glatte und harte Oberfläche (z. B. einen Tisch) und schieben Sie die transparente Neuladehülse über das Gerät.

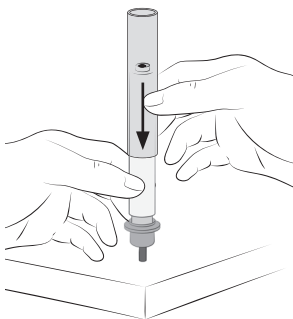


2. Halten Sie die transparente Neuladehülse mit dem Daumen an der Oberseite fest.

Achten Sie darauf, die Finger nicht auf die Kappe zum Auslösen/Neuladen zu legen!



3.

Drücken Sie das Gerät vertikal auf die Oberfläche, bis die Spitze (die simulierte Nadel) wieder vollständig in die Kappe eingeführt und eingerastet ist (beim Einrasten sollte ein „Klicken“ zu hören sein).

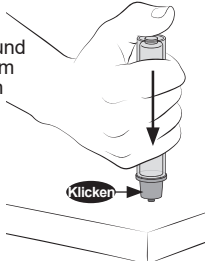

5.

Umfassen Sie das Gehäuse des Autoinjektor-Trainingsgerätes, und legen Sie Ihren Finger auf das Ende des Stifts (der simulierten Nadel). Schieben Sie mit der anderen Hand den Sicherheitsstift vorsichtig bis zum Anschlag ein, während Sie mit Ihrem Finger leicht gegen die Spitze (die simulierte Nadel) drücken.



Kontrollieren Sie, dass der Sicherheitsstift vollständig eingesetzt ist.




WARNUNG

Achten Sie dabei darauf, den Sicherungsstift parallel zur Achse des Injektorgehäuses und nicht schräg einzusetzen. Ansonsten könnte das Autoinjektor-Trainingsgerät stark beschädigt werden.

4.

Entfernen Sie die transparente Neuladehülse.

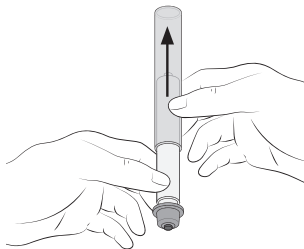

6.



Legen Sie das Autoinjektor-Trainingsgerät und die Neuladehülse nebeneinander zurück in den Plastikbeutel.

Schließen Sie den Plastikbeutel.