

AUTO-INJECTEUR D'APPRENTISSAGE – MANUEL D'UTILISATION

L'auto-injecteur d'apprentissage simule l'action d'administration d'un médicament à l'aide d'un auto-injecteur pré-rempli.


Il est conçu **uniquement à des fins d'apprentissage**.

Il ne contient ni produit chimique, ni aiguille et ne comporte pas de risque pour la santé ou la sécurité.

Étant rechargeable, il peut être réutilisé.

L'auto-injecteur d'apprentissage comprend un tube de recharge transparent.

Composants principaux de l'auto-injecteur d'apprentissage

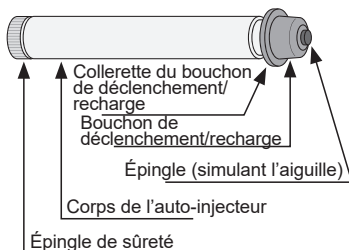

Tube de recharge transparent



REMARQUE IMPORTANTE

Le tube de recharge transparent est uniquement utilisé à des fins de rechargement de l'auto-injecteur d'apprentissage après chaque utilisation.

Le tube de recharge transparent ne fait pas partie intégrante ni de l'auto-injecteur d'apprentissage, ni de l'auto-injecteur réel.

Comment utiliser l'auto-injecteur d'apprentissage :

1.




Attention à ne pas placer vos doigts sur le bouchon de déclenchement/recharge.

REMARQUE

Si l'auto-injecteur d'apprentissage est fourni glissé dans le tube de recharge transparent, le retirer de ce dernier.

2.

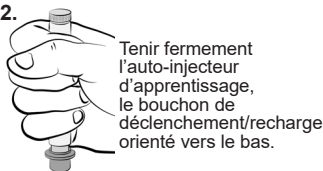

Tenir fermement l'auto-injecteur d'apprentissage, le bouchon de déclenchement/recharge orienté vers le bas.

3.




Retirer l'épingle de sûreté avec votre autre main.

REMARQUE

Dans la réalité, le stylo avec solution injectable comprend une aiguille qui doit être pliée après utilisation et fixée aux vêtements de la personne venant de recevoir le produit administré dans une zone visible (c'-à-d. la manche supérieure).

4.

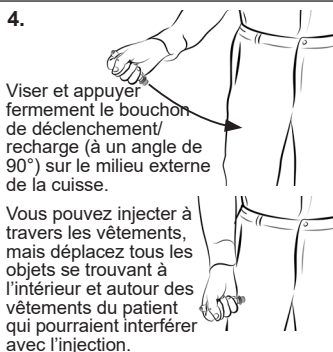

Viser et appuyer fermement le bouchon de déclenchement/recharge (à un angle de 90°) sur le milieu externe de la cuisse.

Vous pouvez injecter à travers les vêtements, mais déplacez tous les objets se trouvant à l'intérieur et autour des vêtements du patient qui pourraient interférer avec l'injection.

Tenir l'auto-injecteur d'apprentissage fermement en place pendant au moins 10 secondes, afin de simuler une injection complète.

REMARQUE

Pour les personnes présentant peu de graisse sur le milieu externe de la cuisse, pincer fermement un pli de peau au niveau du site d'injection pour obtenir une zone plus épaisse pour l'administration.

5.

Retirer l'auto-injecteur d'apprentissage du milieu externe de la cuisse et masser le site d'injection avec un mouvement circulaire afin de simuler une utilisation réelle.

Vérifier que l'épingle (simulant l'aiguille) est sortie. Cela indique que l'auto-injecteur d'apprentissage a été activé avec succès.



AVERTISSEMENT


Ne pas replacer l'épingle de sûreté avant d'avoir rechargé l'auto-injecteur, lorsque l'épingle (simulant l'aiguille) est encore sortie. Cela pourrait endommager de manière irréversible l'auto-injecteur d'apprentissage.

Comment recharger l'auto-injecteur d'apprentissage en vue d'une réutilisation :




AVERTISSEMENT

Ne pas replacer l'épingle de sûreté avant d'avoir rechargé l'auto-injecteur, lorsque l'épingle (simulant l'aiguille) est encore sortie. Cela pourrait endommager de manière irréversible l'auto-injecteur d'apprentissage.

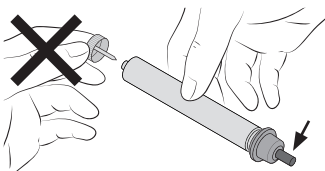

1.


Placer l'auto-injecteur d'apprentissage verticalement en prenant soin de positionner l'épingle (simulant l'aiguille) contre une surface dure, plate et lisse (comme une table) et faire glisser le tube de recharge transparent de manière à recouvrir l'auto-injecteur d'apprentissage.

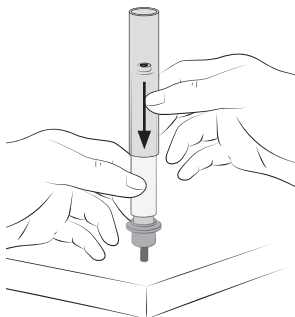

2.


Tenir fermement le tube de recharge transparent avec le pouce sur la partie supérieure.

Attention à ne pas placer vos doigts sur le bouchon de déclenchement/recharge.

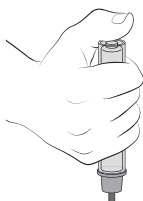


3.

Appuyer verticalement contre la surface jusqu'à ce que l'épingle (simulant l'aiguille) se réinsère complètement dans le bouchon et se verrouille (le verrouillage génère un « clic » sonore).

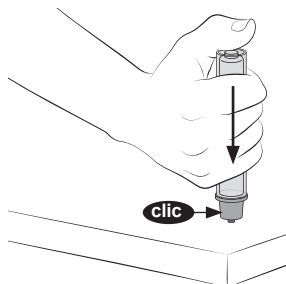

4.

Retirer le tube de recharge transparent.

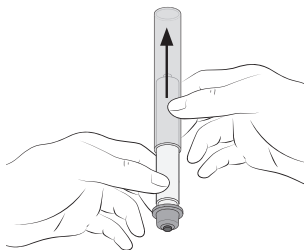

5.

Tenir le corps de l'auto-injecteur d'apprentissage dans votre main, placer votre doigt à l'extrémité de l'épingle (simulant l'aiguille) et insérer doucement l'épingle de sûreté à sa place avec votre autre main tout en exerçant une légère pression avec votre doigt sur l'épingle (simulant l'aiguille).




Vérifier que l'épingle de sûreté est entièrement insérée.



AVERTISSEMENT

Vérifier le bon alignement de l'épingle de sûreté avec le corps de l'injecteur lors de l'insertion de cette dernière. Les deux composants doivent être sur un même axe et ne pas former un angle. Dans le cas contraire, cela pourrait endommager de manière irréversible l'auto-injecteur d'apprentissage.

6.

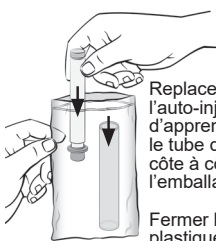

Remplacer l'auto-injecteur d'apprentissage et le tube de recharge, côte à côte, dans l'emballage plastique.

Fermer l'emballage plastique.